

Eine Binde. Große Wirkung.



UrgoK1 So **einfach** geht
Kompression heute.

Willkommen im **UrgoK1 Zeitalter.**

Für alle Patienten* mit venösen Unterschenkelulzera bzw. Unterschenkelödemen bietet **UrgoK1** einen neuen Standard in der Kompressionstherapie. Dank innovativer 3D-Webtechnologie vereint das mehrfach patentierte **UrgoK1** die Eigenschaften einer Kurzzug- und einer Langzugbinde **in einer einzigen Kompressionsbinde** und erreicht damit 24 Stunden Wirksamkeit bei maximalem Tragekomfort.



*Geschlechtsspezifische Personenbezeichnungen inkludieren alle Geschlechter.

Die kontinuierliche Kompression Tag und Nacht

ermöglicht auch bei mehrtägiger Tragedauer eine zuverlässige Wirksamkeit unabhängig von der Mobilität des Patienten²:



Spezielle Materialbehandlung **verhindert Verrutschen**¹



Wirksam in Ruhe und Bewegung mit dem therapeutisch notwendigen Druck¹



Tragedauer von **bis zu 7 Tagen**² möglich, je nach Verbandswechselintervall und Patientenbedürfnis


Einfach
mehr
Effektivität.

Kurzzugbinden

UrgoK1

24/7

- keine Druckkontrolle bei Anlage der Binden
- verminderte Effektivität durch schnellen Druckverlust
- zu geringer Ruhedruck^{*,3}

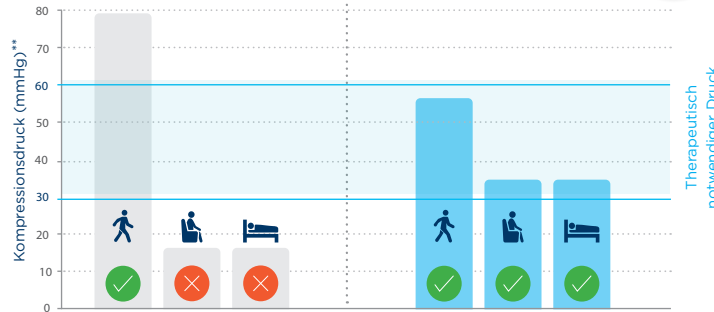

- + Starker Arbeitsdruck¹
- + Moderater Ruhedruck¹
- + Kontinuierlich optimale Kompression¹

* Kurzzugbinden können nicht richtig funktionieren, wenn die Wadenmuskelpumpe schwach oder ineffektiv ist.³

** mmHg = im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck. Die Grafik dient Informationszwecken.

Die schnelle, einfache und sichere Anwendung^{1,4,5}

gibt Ihnen Sicherheit und bedeutet Zeitersparnis. Erfahren Sie spürbare Erleichterung und gestalten Sie die Kompressionstherapie noch effizienter:

Einfach
mehr Zeit.

- 1** Nur eine **Binde** und **einfache Anlegetechnik**
-  **Schnelles Anlegen** in unter 2 Minuten⁴
-  Zuverlässige und sichere Druckerreichung dank **Druckindikatoren**⁵
-  Mit **repositionierbarem** Befestigungssystem
-  bis zu **3x waschbar**⁶



UrgoK1 So **einfach** geht
Kompression heute.



Der hohe Tragekomfort

ermöglicht mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit und macht im täglichen Leben Ihrer Patienten einen echten Unterschied:



Nur **eine dünne**, diskrete, atmungsaktive Binde* und damit mehr Möglichkeiten z.B. bei der Schuhauswahl¹



Mehr Bewegungsfreiheit fördert die Lebensqualität²



Verbessert den **Patientenkomfort** und trägt zur **Patientenadhärenz** bei²

**Einfach
mehr
Freiheit.**

*im Vergleich zu herkömmlichen Kompressionsverbänden.

UrgoK1 einfach verordnen:



Knöchelumfang	Bindenbreite	Packungsgröße	Art.-Nr.	PZN
18–25 cm	10 cm	Therapiepackung (6 Binden)	605795	16901219
25–32 cm	10 cm	Therapiepackung (6 Binden)	605801	16901231
18–25 cm	10 cm	Einzelpackung (1 Binde)	605779	16901202
25–32 cm	10 cm	Einzelpackung (1 Binde)	605796	16901225

Art.-Nr.: 802450, Stand: 07/2026

Bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage beachten. Copyright Urgo GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten.

1: Benigni JP, Balet F, Guidet B, Tacca O. Static Stiffness Index of Two Multicomponent Bandage Compression Systems: Results of a Randomized Controlled Trial on Healthy Volunteers [Statistischer Stiffness-Index von zwei Multikomponenten-Bandagen-Kompressionssystemen: Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie an gesunden Probanden]. Phlebologie 2021. Published in Dec. DOI: 10.1055/a-1487-4194 **2:** Senet P., Addala A., Léger P. et al.: A new compression system for treatment of venous leg ulcers: a prospective, single-arm, clinical trial (FREEDOM). JWC 2022; 31(9),734–747. **3:** Understanding Compression Therapy: EWMA Position Document 2003- p14 **4:** Moelleken M., Krefting F., Kleinhans M., Dissemond J.: Kompressionstherapie mit einem neuen Mehrkomponentensystem mit nur einer Binde bei Patienten mit Ulcus cruris und Ödemen. WUNDmanagement 2023; 17(1): 24– 30 **5:** Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. Br J Nurs 2008;17(20): S. 16–24; concerned product: UrgoK2. **6:** Internal data

Weitere
Informationen
und Muster-
bestellung unter:



URGO GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 16
D-66280 Sulzbach

info@urgo.de
www.urgo.de

Info-Hotline: 0800 874 64 624
www.urgok1.de

UrgoK1 ist
eine Marke von

URGO
MEDICAL
Healing people